



КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ ДЕТСКАЯ ПОВЫШЕННОЙ
ORTONICA PUMA 300



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Ответственность	3
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1. Назначение	4
1.2. Основные параметры и характеристики.....	4
1.3. Конструктивные требования	8
1.4. Требования надежности и ремонтпригодности	12
1.5. Качество и гарантия	12
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
2.1. Опасности при эксплуатации.....	15
2.2. Меры предосторожности	17
2.3. Пересаживание.....	18
2.4. Указания по эксплуатации	19
2.5. Регулировки инвалидной коляски	22
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	28
4. ХРАНЕНИЕ	29
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	29
6. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ	30

ВВЕДЕНИЕ

Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 300

(далее по тексту – кресло-коляска, коляска, изделие) – отличается повышенным комфортом и большим количеством регулировок, таких как сиденье, подлокотники и подножки. Для удобства самостоятельного управления ребенком коляска оснащена большими приводными колесами. Съёмный столик обеспечивает поддержку верхней части тела и является идеальным местом для приема пищи.



Прочтите Инструкцию по эксплуатации до того, как начнете пользоваться инвалидной коляской. Вы получите важные указания по управлению, которые позволят полностью использовать технические преимущества коляски Ortonica.

Ответственность

За ущерб, возникший вследствие использования изделия не по назначению, изготовитель ответственности не несет.

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, использующие данное изделие или проводящие работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю, должны читать и выполнять указания настоящей Инструкции.

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства изделия или его работоспособность и тем самым отрицательно сказаться на эксплуатации (предотвращение несчастных случаев).

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования непроверенных деталей и дополнительных устройств, самовольного проведения изменений в конструкции изделия потребителем, ответственность производителя полностью исключена.

В исполнении гарантийных обязательств владельцу изделия может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания иностранных предметов, веществ и т. п. во внутренние или внешние части изделия.



ВНИМАНИЕ!

1. Перед началом использования изделия познакомьтесь основательно с настоящей Инструкцией.
2. При передаче изделия другому владельцу вместе с ним должна быть передана настоящая Инструкция.

Существенная опасность возрастает, если пользователь не следует правилам эксплуатации и мерам техники безопасности.

Для гарантии безопасной работы, перед использованием изделия, каждый пользователь должен быть полностью ознакомлен с положениями настоящей Инструкции и мерами предосторожности.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение

Настоящая Инструкция распространяется на кресло-коляску инвалидную детскую повышенной комфортности Ortonica Puma 300, предназначенную для самостоятельного передвижения либо передвижения с сопровождающим лицом, дома, а также на улице с ровным дорожным покрытием и доступной средой, детей-инвалидов, в том числе детей с ДЦП.

Коляска устойчива к воздействию климатических факторов при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения У1.1, от -45 °С до +40 °С и относительной влажности 98% при температуре +25 °С.

1.2. Основные параметры и характеристики


1.2.1. Коляска полностью готова к работе и работоспособна при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и указаний эксплуатационной документации.

1.2.2. Выступающие части изделия, которые могут соприкасаться с руками, ногами и другими частями тела пользователя и сопровождающего в процессе езды и технического обслуживания коляски, являются безопасными.

- 1.2.3. Требования по эргономике – по ГОСТ Р ЕН 614-1-2003.
- 1.2.4. Механизмы управления коляской снабжены четкими надписями, схемами и символами.
- 1.2.5. Уровень шума при работе коляски не превышает значений, установленных в ГОСТ 12.1.003-2014.
- 1.2.6. Изделие является прочным и устойчивым при воздействии на него механических нагрузок, возникающих в обычных условиях эксплуатации.
- 1.2.7. Все резьбовые соединения надежно затянуты.
- 1.2.8. Все вращающиеся детали и сборочные единицы проворачиваются в своих опорах без заеданий.
- 1.2.9. Основные технические характеристики коляски соответствуют требованиям, приведенным в таблице № 1.

Таблица №1. Технические характеристики

Полная габаритная длина кресла-коляски, ± 10 мм	900-965	
Габаритная высота кресла-коляски, ± 10 мм	800-1190	
Габаритная ширина кресла-коляски, ± 10 мм	565	595
Длина кресла-коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	775	
Ширина кресла-коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	300	
Высота кресла-коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	825	
Масса нетто, кг, не более	18,8	
Максимальная масса пользователя, кг	80	
Материал рамы	Алюминий	
Ремни безопасности	Есть	
Масса самой тяжелой части кресла-коляски (рамы), кг, не более	8,45	
Статическая устойчивость при спуске, $\pm 1^\circ$	10°	
Статическая устойчивость при подъеме, $\pm 1^\circ$	10°	
Статическая устойчивость боковая, $\pm 1^\circ$	10°	
Высота препятствия, мм, не более	40	
Угол наклона плоскости сиденья, $\pm 1^\circ$	$-15 - +5^\circ$	
Эффективная глубина сиденья, ± 10 мм	365-415	
Ширина сиденья, ± 10 мм	380	405
Высота сиденья, ± 10 мм	400-440	
Угол наклона спинки, $\pm 1^\circ$	$85-105^\circ$	
Высота спинки, ± 15 мм	405-455	
Длина подножки, ± 10 мм	285-365	
Угол наклона подножки к поверхности сиденья, $\pm 10^\circ$	109°	
Высота подлокотника, ± 5 мм	190-280	
Минимальный радиус поворота, ± 70 мм	1050	

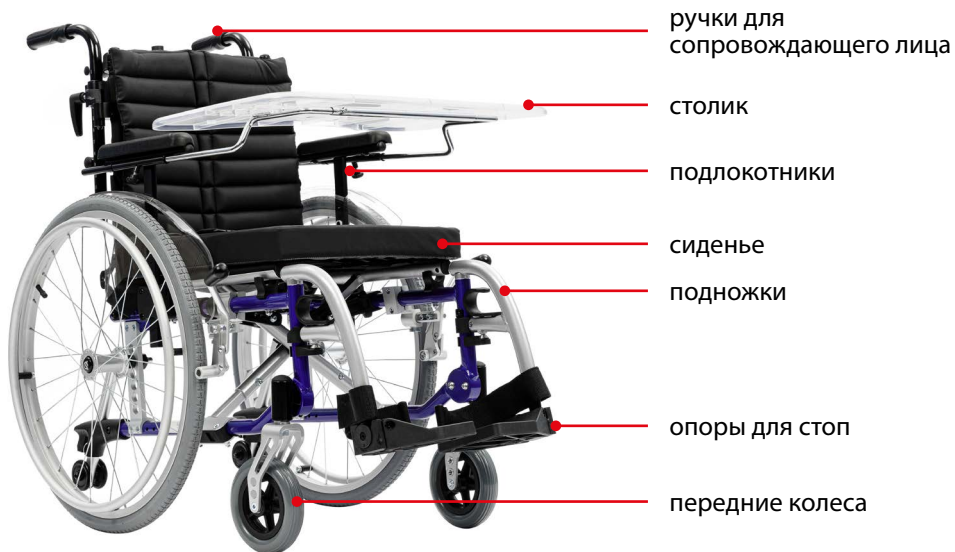

1.3. Конструктивные требования

1.3.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-коляска	1
2	Паспорт изделия	1
3	Насос (при наличии пневматических шин)	1
4	Набор инструментов	1

1.3.2. Коляска состоит из следующих компонентов:

1.3.2.1. Съёмные ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте

1.3.2.2. Спинка, регулируемая по высоте и по углу наклона

1.3.2.3. Распорка спинки

1.3.2.4. Ремни натяжения спинки

1.3.2.5. Сиденье, регулируемое по высоте, ширине и глубине

1.3.2.6. Ремни натяжения сиденья

1.3.2.7. Тазовый ремень

1.3.2.8. Подлокотники, съёмные, регулируемые по высоте

1.3.2.9. Съёмный столик

1.3.2.10. Прозрачные боковые щитки

1.3.2.11. Ручные стояночные тормоза

1.3.2.12. Быстросъёмные задние колеса, регулируемые по горизонтали и по вертикали

1.3.2.13. Передние колеса, регулируемые по вертикали

1.3.2.14. Подножки, съёмные, откидные, регулируемые по длине

1.3.2.15. Опоры для стоп, откидные, регулируемые по углу наклона

1.3.2.16. Съёмные колесные антипрокидыватели, совмещенные с упором для сопровождающего лица, регулируемые по высоте

Рис. 1



1.3.2.1. Съемные ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте

Позволяют настроить коляску под рост сопровождающего лица (рис. 1).

Рис. 2




1.3.2.2. Спинка, регулируемая по высоте и по углу наклона

Снижает:

- нагрузку на позвоночник и мышцы спины во время длительного пребывания в коляске;
- нагрузку на внутренние органы;
- усталость (рис. 2).

Рис. 3

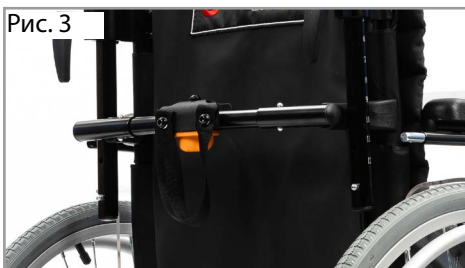

1.3.2.3. Распорка спинки

Придает дополнительную жесткость и прочность конструкции (рис. 3).

Рис. 4



1.3.2.4. Ремни натяжения спинки

Обеспечивают поддержку и удобство (рис. 4).

Рис. 5



1.3.2.5. Сиденье, регулируемое по высоте, ширине и глубине

Позволяет адаптировать коляску под индивидуальные потребности ребенка. Обеспечивает комфорт в положении сидя (рис. 5).



Рис. 6

1.3.2.6. Ремни натяжения сиденья

Регулируют жесткость сиденья для поддержания здоровья при длительной эксплуатации (рис. 6).



Рис. 7

1.3.2.7. Тазовый ремень

Комфортно и надежно фиксирует таз в правильном положении (рис. 7).



Рис. 8

1.3.2.8. Съёмные подлокотники

Обеспечивают беспрепятственное пересаживание с коляски и обратно (рис. 8).



Рис. 9

Подлокотники, регулируемые по высоте

Обеспечивают удобство и комфорт для пользователя (рис. 9).



Рис. 10

1.3.2.9. Съёмный столик

Незаменим для приема пищи и развития мелкой моторики. Обеспечивает поддержку верхней части туловища (рис. 10).



1.3.2.10. Прозрачные боковые щитки

Позволяет защитить от попадания одежды в колеса (рис. 11).



1.3.2.11. Ручные стояночные тормоза

Осуществляют надежную фиксацию коляски:

- при пересаживании;
- во время остановки (рис. 12).



1.3.2.12. Быстросъемные задние колеса, регулируемые по горизонтали и по вертикали

Упрощают хранение, транспортировку и уход за коляской, обеспечивают регулировку угла наклона для настройки баланса центра тяжести (рис. 13).



1.3.2.13. Передние колеса, регулируемые по вертикали

Обеспечивают комфортную настройку в зависимости от предпочтений пользователя (рис. 14).



1.3.2.14. Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине

Упрощают пересаживание и позволяют близко подъезжать к мебели. Обеспечивают комфортную настройку под рост пользователя (рис. 15).



1.3.2.15. Опоры для стоп, откидные, регулируемые по углу наклона

Облегчают пересаживание, предоставляют возможность настройки удобного положения для стоп (рис. 16).



1.3.2.16. Съемные колесные антипрокидыватели, совмещенные с упором для сопровождающего лица, регулируемые по высоте

Обеспечивают безопасное преодоление барьеров во время:

- езды по неровным дорогам;
- езды через поребрики на улице;
- езды через пороги дома

(рис. 17).

1.4. Требования надежности и ремонтпригодности

1.4.1. Эксплуатация кресла-коляски должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

1.4.2. Срок службы кресла-коляски при эксплуатации – 6 лет.

1.4.3. За предельное состояние принимается состояние кресла-коляски, при котором восстановление его работоспособности невозможно, либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла-коляски).

1.5. Качество и гарантия

Гарантийный ремонт – это работы, направленные на бесплатное восстановление работоспособности кресла-коляски в период действия гарантийного срока.

1.5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

1.5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

1.5.3. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

1.5.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения кресла-коляски, возникшие в результате неправильного использования:

- превышение допустимой нагрузки, указанной в настоящей инструкции по эксплуатации;
- сколы, вмятины, трещины, царапины и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждения, вызванные потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезд на препятствия высотой более 4 см;
- перемещение в кресле-коляске на спущенных шинах;
- проколы камер в шинах колес и т.п.

1.5.5. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии Гарантийного талона.

1.5.6. Гарантия ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки) и не распространяется на:

- регламентные работы при техническом обслуживании, а также на расходные материалы;
- лакокрасочное покрытие (гарантия предоставляется на сквозную коррозию);
- диски колес и покрышки;
- нормальный износ и естественное старение любых деталей (покрышки, камеры, фрикционные накладки, текстиль, резиновые и пористые части (подлокотных опор), пластиковые детали);
- резиновые элементы, обивку и отделку, изнашиваемые в результате воздействия окружающей среды и нормального использования;

- слабые звуки, шум, вибрации, возникающие в процессе эксплуатации кресло-коляски, которые не влияют на характеристики и работоспособность кресло-коляски;
- регулировочные работы, включая регулировки ручного тормоза или положения элементов кресло-коляски;
- запасные части и расходные материалы, приобретённые не у представителя завода-изготовителя;
- повреждения кресло-коляски в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения;
- повреждения, возникшие в следствие превышения максимально допустимой на кресла-коляску нагрузки;
- детали и элементы кресла-коляски, которые вышли из строя вследствие воздействия внешних факторов, таких как: механические повреждения различного происхождения, промышленные выбросы, соли и другие химические соединения, природные воздействия (град, молния, выделения растений и т.п.).

1.5.7. Гарантийные обязательства завод-изготовитель (представитель, продавец) утрачивает перед пользователем (потребителем) в случаях, если неисправность произошла по следующим причинам:

- невыполнение либо несвоевременное выполнение технического обслуживания в объемах, требуемых заводом-изготовителем;
- несоблюдение условий и требований инструкций по эксплуатации кресла-коляски;
- самовольная разборка и вскрытие узлов и агрегатов;
- самовольное внесение изменений в конструкцию кресла-коляски.

1.5.8. Максимальный срок выполнения работ по восстановлению работоспособности кресла-коляски в период действия гарантийного срока составляет 45 дней.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Опасности при эксплуатации



Категорически запрещена эксплуатация коляски без антипрокидывателей.



Опасность падения при неправильном удерживании коляски. Сопровождающие лица должны удерживать инвалидную коляску только за ручку для сопровождающего лица.



Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При эксплуатации коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски. При преодолении подъемов и препятствий наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести.



Опасность падения при самостоятельном преодолении лестниц и пандусов. Для преодоления лестниц, оборудованных въездными пандусами, воспользуйтесь помощью сопровождающего лица. Лестницы, не оборудованные въездными пандусами или подъемниками, должны преодолеваться только с помощью двух помощников, один из которых встает впереди коляски, а другой сзади. Помощник, стоящий позади коляски, наклоняет ее до достижения равновесия, затем подвозит ее к первой ступеньке, крепко ухватив за ручки. Второй помощник, находящийся впереди коляски, крепко держит ее за передние элементы рамы и приподнимает по ступеням, в то время как первый помощник ставит ногу на следующую ступеньку, повторяя предыдущую операцию. Не опускайте передние колеса до тех пор, пока помощник, стоящий перед коляской, не преодолит последнюю ступеньку. Чтобы спустить коляску с лестницы, повторите описанные выше операции в обратном порядке.



Опасность опрокидывания на склонах. Проезжая такие участки, заблаговременно снижайте скорость, и, пересекая их, не притормаживайте, так как неравномерное торможение приводных колес может привести к развороту или опрокидыванию.



Использование инвалидной коляски в темное время суток. В темное время суток носите как можно более светлую одежду или одежду со светоотражателями, чтобы Вас было лучше видно. Не снимайте светоотражатели с инвалидной коляски.



Опасность аварии при использовании изношенных покрышек. Недостаточная высота рисунка протектора снижает сцепление. Помните, что при передвижении по улицам Вы подпадаете под действие правил дорожного движения.



Опасность вследствие неправильного использования стояночного тормоза. Стояночные тормоза не являются рабочими тормозами. Не допускается их использование в движении. Внезапная блокировка инвалидной коляски при движении может привести к опрокидыванию.



Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек. При одинаковой величине давления в шинах управлять инвалидной коляской легче и удобнее.



Опасность неправильной установки приводных колес. Постоянно следите за правильной установкой приводных колес. Быстроразъемные оси должны быть установлены до щелчка.



Опасность опрокидывания при переустановке приводных колес в крайние положения. В таком случае возможно опрокидывание даже на ровной поверхности. Для инвалидов с ампутацией бедра приводные колеса должны быть обязательно переставлены назад!



Опасность получения травм рук. Во избежание травм рук беритесь только за обод приводных колес, не касайтесь пальцами спиц.



Опасность получения травмы при посадке. При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки.



Опасность получения ожогов вследствие трения. При эксплуатации коляски пользуйтесь кожаными перчатками, улучшающими сцепление и защищающими пальцы от ожогов при торможении ободом колеса.



Запрещается преодоление препятствий (например, бордюров) высотой более 4 см без сопровождающего лица.



Запрещается эксплуатация кресла-коляски с неисправными тормозами



При посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза.




Масса пользователя не должна превышать максимальное значение из Таблицы №1.




Сопровождающее лицо должно обладать физической и психической дееспособностью: приводить в движение кресло-коляску, управлять им и тормозить собственными силами.

2.2. Меры предосторожности

Совершая наклоны в коляске, помните о следующих мерах предосторожности.

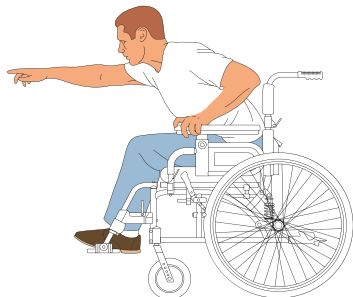

ПРАВИЛЬНО

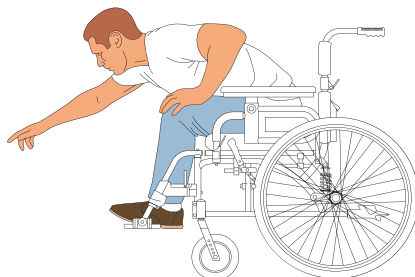


НЕПРАВИЛЬНО

Наклон вперед


При глубоких наклонах вперед грудь не должна выходить за пределы передних колес (слишком сильный перенос веса вперед может привести к опрокидыванию). Для обеспечения большей стабильности свободной рукой держитесь за инвалидную коляску. При перемещении веса тела вперед не следует пересаживаться на край сиденья.

Наклон назад

Для осуществления наклона назад следует вплотную сесть к спинке коляски и выровнять передние колеса. Не используйте стояночный тормоз. Наклонитесь назад, не меняя положения сиденья. Не следует слишком наклоняться назад и перевешиваться через спинку коляски. Свободной рукой держитесь за инвалидную коляску.

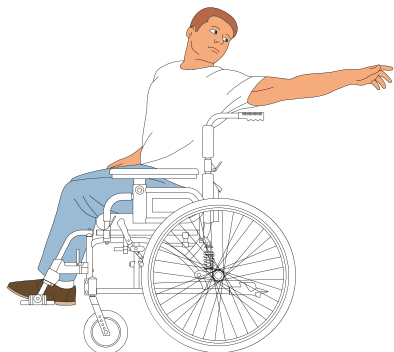


ПРАВИЛЬНО

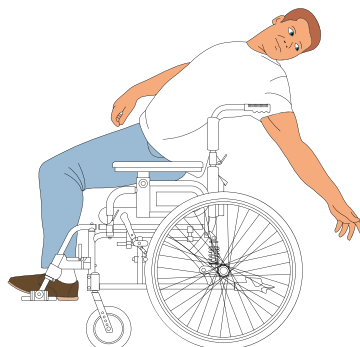


НЕПРАВИЛЬНО

Наклон вбок

При осуществлении наклона вбок следите, чтобы грудь не выходила за пределы заднего колеса. При перемещении веса тела слишком глубоко возможно опрокидывание. Свободной рукой держитесь за инвалидную коляску.

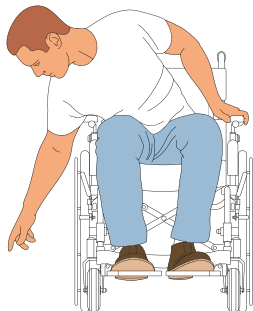


ПРАВИЛЬНО

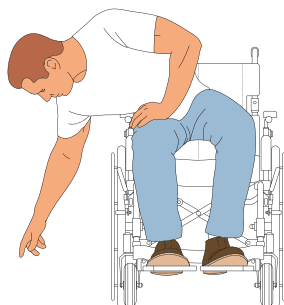

НЕПРАВИЛЬНО

2.3. Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

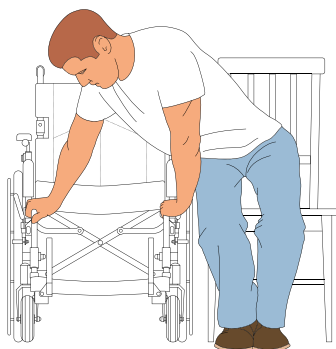

Общие правила пересаживания:

1. Как можно ближе расположите коляску к месту пересаживания либо к себе, если пересаживаетесь в коляску.
2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.
3. Заблокируйте приводные колеса ручными тормозами.
4. При пересаживании из коляски опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, независимую от коляски, постепенно перенесите вес тела на руки и осуществите высадку из коляски. При пересаживании в коляску необходимо опереться одной рукой о подножку коляски и совершить пересаживание.
5. Чтобы облегчить процесс пересаживания, следует откинуть подлокотники либо совсем снять (если это позволяет конструкция).
6. Вновь откиньте опоры для ног коляски. Поставьте на них ноги. Затем снимите коляску со стояночных тормозов. Теперь можно пользоваться инвалидной коляской.

2.4. Указания по эксплуатации

Коляска предназначена для самостоятельного передвижения либо передвижения сопровождающим лицом.

2.4.1. Условия эксплуатации

Коляска предназначена для использования дома, а также на улице с ровным дорожным покрытием и доступной средой.

2.4.2. Сборка

Для того чтобы привести коляску в рабочее состояние, установите задние колеса (рис. 18). Для установки задних колес нажмите кнопку на быстросъемной оси заднего колеса. Вставьте ось во втулку колеса, затем, взявшись пальцами за спицы, вставьте ее в специальное отверстие на раме до характерного щелчка.



При сборке обязательно следите за тем, чтобы все фиксаторы слышно защелкивались в соответствующих гнездах, а вставные оси приводных колес были зафиксированы в приемных втулках. При не нажатой кнопке приводные колеса должны надежно удерживаться в приемной втулке.

1. Разложите коляску, нажав ладонями на трубы сиденья (рис. 19).




2. Установите подушки на спинку и сиденье (рис. 20).



3. Установите каждую из подножек в крепления на раме и поверните их в рабочее положение до щелчка (рис. 21).



4. Откиньте вниз опоры для стоп (рис. 22).

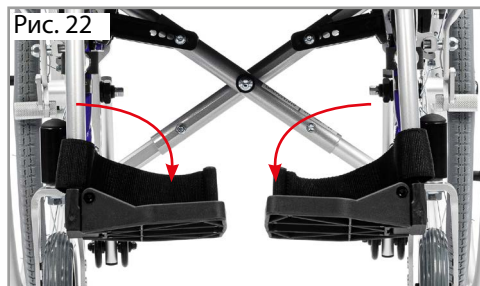

5. Установите столик и туго затяните барашковыми болтами с двух сторон (рис. 23).



2.5. Регулировки инвалидной коляски

2.5.1. Ручки для сопровождающего

Съемные ручки для сопровождающего лица регулируются по высоте. Для регулировки ручки по высоте, ослабьте фиксатор, установите необходимую высоту и туго закрутите фиксатор (рис. 24).



2.5.2. Спинка

Спинка регулируется по высоте и по углу наклона.

Чтобы отрегулировать высоту спинки, нужно открутить болты под обшивкой спинки с двух сторон (рис. 25), установить нужное положение и закрутить болты.



Чтобы настроить угол наклона спинки, необходимо с помощью шестигранного и накидного ключей ослабить болтовое соединение (рис. 26), опустить спинку на необходимый уровень симметрично с обеих сторон, и закрутить болтовые соединения.




2.5.3. Сиденье


Сиденье, регулируется по высоте, ширине и глубине

Высота сиденья регулируется за счет переустановки задних колес. Если вам необходимо отрегулировать сиденье по высоте, пожалуйста, смотрите пункт 2.5.6.

Чтобы отрегулировать глубину сиденья, необходимо шестигранным ключом открутить болтовые соединения на креплении (рис. 27), затем переставить крепление в нужно положение и закрутить болтовые соединения.

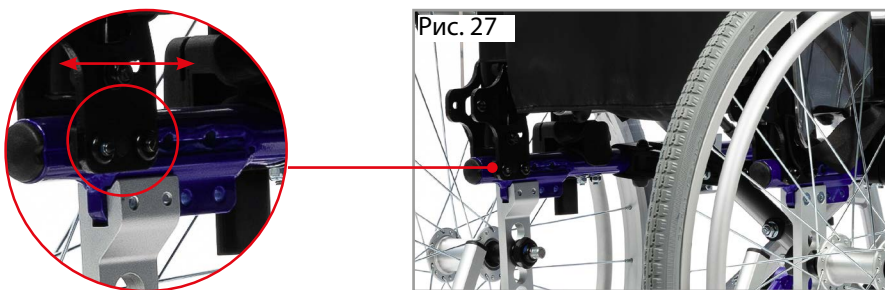


Чтобы отрегулировать ширину сиденья, нужно открутить болтовые соединения на креплении (рис. 28), переустановить крепление и закрутить болтовые соединения. Затем следует переустановить ширину распорки спинки, нажав на кнопки (рис. 29).

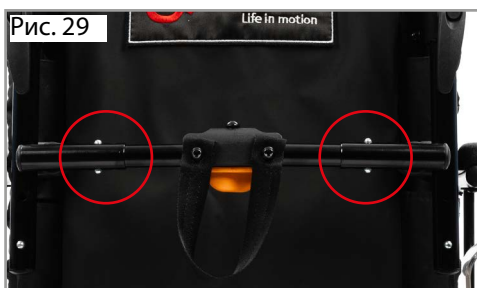

2.5.4. Подлокотники

Съемные, подлокотники регулируются по высоте. Чтобы отрегулировать высоту подлокотников, необходимо ключами, входящими в комплект, открутить болтовые соединения (рис. 30), переставить ограничитель на нужный уровень и закрутить болтовые соединения. Аналогичным образом можно снять подлокотники.

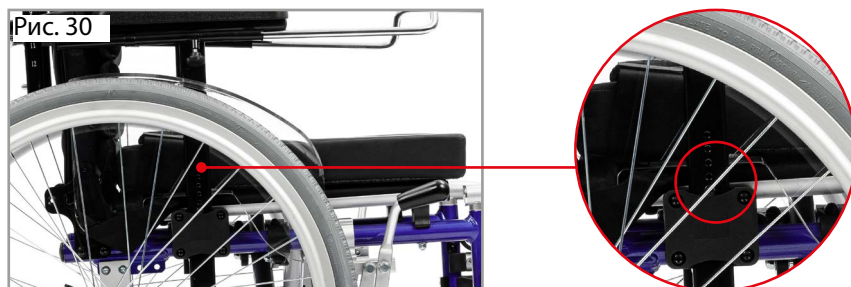


2.5.5. Стояночные тормоза

Стояночный тормоз можно отрегулировать по горизонтали. Для этого необходимо с внутренней стороны коляски шестигранным ключом ослабить болтовые соединения (рис. 31), затем установить нужное положение и затянуть болтовые соединения.



2.5.6. Задние колеса

Задние колеса регулируются по вертикали и горизонтали. Чтобы отрегулировать задние колеса по вертикали, необходимо снять заднее колесо, открутить гайки накидным ключом и вынуть втулку. Затем вставить втулку в нужное отверстие, туго затянуть гайки и установить задние колеса (рис. 32).

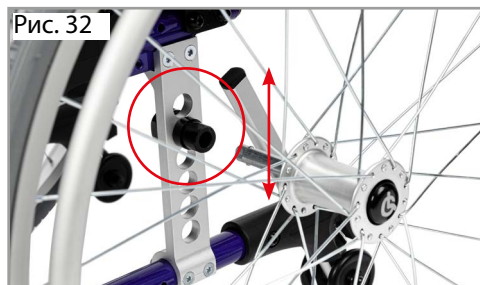

Чтобы отрегулировать задние колеса по горизонтали, с помощью шестигранного и накидного ключей открутите болты сверху и снизу крепления (рис. 33). Переставьте крепления в нужное положение, затяните болты



2.5.7. Передние колеса

Передние колеса регулируются по высоте. Чтобы отрегулировать передние колеса по высоте, шестигранным ключом открутите болтовое соединение (рис. 34) и установите ось колеса в нужное отверстие, закрутите болтовое соединение.



2.5.8. Подножки

Съемные, откидные подножки регулируются по длине. Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо открутить болтовые соединения (рис. 35), установить нужную высоту и закрутить болтовые соединения.



Чтобы откинуть подножки потяните за рычаг вверх. Чтобы снять подножки, откиньте их и поднимите вверх (рис. 36).



2.5.9. Опоры для стоп

Опоры для стоп регулируются по углу наклона. Для регулировки необходимо шестигранным ключом ослабить болтовое соединение (рис. 37), установить требуемое положение и закрутить болтовое соединение.



2.5.13. Антипрокидыватели

Съемные колесные антипрокидыватели, совмещенные с упором для сопровождающего лица, регулируются по высоте. Для регулировки антипрокидывателей по высоте следует потянуть на себя и удерживать фиксирующий штифт (рис. 38), затем установить антипрокидыватель на нужную высоту, отпустить штифт.



2.5.14. Колеса

Снятие и установка задних колес: нажмите на кнопку на соответствующей вставной оси и, взявшись пальцами за спицы, выньте ось колеса. Установка колес производится в обратном порядке.

Снятие и установка передних колес: используя ключ, входящий в комплект, открутите болтовое соединение и снимите болт с оси колеса; снимите переднее колесо с вилки. Установка колес производится в обратном порядке.

Если колеса пневматические, не забудьте проверить давление в шинах. При необходимости накачайте колеса.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание и уход – это работы, направленные на поддержание работоспособности кресла-коляски.

Ответственность за своевременное проведение данных работ лежит полностью на пользователе кресло-коляски.

Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию и уходу указаны в Таблице № 2.

Таблица № 2. Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию кресла-коляски Puma 300 и уходу за ним.

Наименование работ	Периодичность проведения		
	Перед каждой поездкой	После каждой поездки	Каждые 30 дней
Проверка давления в пневматических шинах, при необходимости подкачка	Х		
Проверка износа шин, при предельном износе (износ протектора ~ 90°) замена	Х		
Протяжка резьбовых соединений			Х
Мойка, чистка		Х	

Моечно-очистные работы включают в себя следующие операции:

- демонтаж колес и очистка осей крепления колес от грязи, и инородных предметов, имеющих свойство наматываться при эксплуатации коляски, что приводит к замедлению движения и способствует интенсивному износу осей (волосы, трава и т.п.);

- мойка покрышек и пластиковых элементов неагрессивными чистящими средствами;

- чистка обивки, тканевых элементов и ремней с использованием теплой воды и неагрессивных моющих средств при помощи губки или мягкой щетки;

- влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес.

Допускается влажная чистка агрессивными чистящими средствами, после чего элементы коляски необходимо хорошо высушить.

Ремонт – это работы, направленные на восстановление работоспособности кресла-коляски. Ремонт инвалидной коляски Ortonica может выполняться исключительно в сервисном центре компании-производителя. Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей можно в сервисном центре производителя или по месту приобретения коляски.

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения коляски, освобожденной от транспортной упаковки, соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С (отапливаемое хранилище);
- относительная влажность до 80% при температуре +25 °С.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Для транспортировки коляска вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и укладывается в короб из гофрированного картона или другую тару, исключая повреждение коляски.

Коляска в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании короб с коляской закрепляется и защищается от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Коляска, упакованная в транспортную тару, при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов для условий хранения 3 по ГОСТ 15150.

Запрещается опрокидывать на бок, переворачивать и резко бросать упакованную коляску во избежание ее повреждения.

6. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Мы собрали для Вас всю полезную информацию в одном месте.

В разделе Вы найдете QR-коды, обеспечивающие мгновенный доступ к полезным ресурсам, инструкциям и товарам.

Расширьте возможности вашей коляски

Сделайте использование коляски удобным и безопасным благодаря дополнительным принадлежностям.



Комфорт пользователя



Обслуживание колес



Больше автономности

Создайте комфортное пространство для жизни

Обеспечьте комфорт в повседневной жизни с помощью практичных решений.



Санитарные стулья



Товары для ванны



Ходунки



Противопролежневые матрасы



Противопролежневые подушки

Получите подарок за отзыв

Расскажите, что Вам нравится в продукции Ortonica и получите подарок.



Оставить отзыв

Получите поддержку от государства

Получите компенсацию за коляску через Социальный фонд России (СФР).



Получить компенсацию



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru




8 (950) 756-67-25 Whatsapp



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ

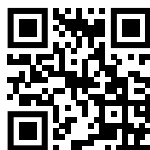

ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE